




Moniteur ECG portatif  
Développé par CardioComm Solutions inc.


## GUIDE DE DÉMARRAGE

Obtenir GEMS™ Mobile ECG

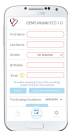

Définir l'utilisateur  
et vérifier l'adresse  
de courriel

Connexion et enregistrer  
votre ECG

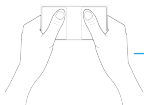

— Bluetooth —



PLUS →

Installer l'appli : GEMS™ Mobile ECG est offert sur le Google Play Store et l'App Store de Apple. Installer l'appli GEMS™ Mobile ECG sur votre appareil intelligent et lancer l'application. Créer un nouvel utilisateur et vérifier l'adresse de courriel.

Connexion : S'assurer que Bluetooth est activé sur votre appareil intelligent.

Sélectionner *Connect to a Device* (Connecter un appareil) sur l'écran d'accueil; puis sélectionner HeartCheck™ CardiBeat dans la liste des appareils et appuyer sur le bouton *Connect* (Connecter). Tenir CardiBeat tel qu'indiqué pour l'activer.

Enregistrement : GEMS™ Mobile ECG commencera l'enregistrement après la connexion à l'appareil. Un décompte de 30 secondes s'affichera pendant l'enregistrement, mais lors de la première utilisation, aucune trace de l'ECG ne sera visible.

Ajouter l'enregistrement au journal à la fin de l'enregistrement (symptômes et activité) et télécharger pour analyse gratuite du médecin pour déverrouiller l'affichage de l'ECG.

Des questions? Des problèmes?

Contactez-nous à

support@theheartcheck.com

1-877-977-9425 poste 4

(+1-416-977-9425 poste 4

à l'ext. de l'Amérique du Nord)

Obtenir plus d'information au

<https://theheartcheck.com/cardibeat/>